



Gebruiksaanwijzing navelstrenging

NL

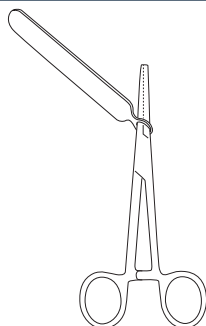


1. Rijk de navelstrenging op de hemostaat.


! Rek de ring niet meer uit dan nodig is, hierdoor kan de ring kapot gaan.

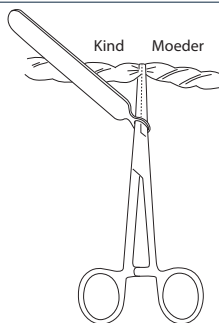

2. Draai de navelstreng vast met de hemostaat in de buurt van de baby. NB: zorg ervoor dat de punt van de hemostaat rand tegen rand met de samengedrukte kant van de navelstreng staat.

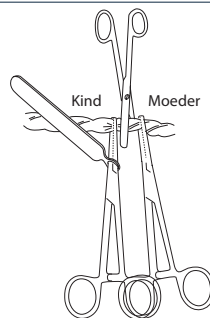


3. Plaats de ene hemostaat naast de andere in de richting van de moeder. Knip de navelstreng tussen de hemostaten met de navelschaar door.

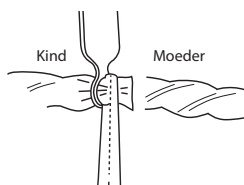

4. Pak de trekplaat van de navelstrenging vast en trek de navelstreng van de homostaat af en over de navelstreng heen.



5. Laat de navelstrenging niet zoals afgebeeld verdraaien. Hierdoor kan de ring losraken.

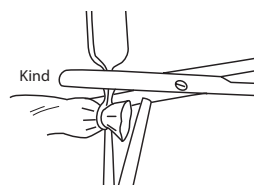

6. Knip de trekplaat van de navelstrenging af op minimaal 1 mm van de navelstrenging, die nu om de navelstreng zit. Maak de hemostaat los.



Controleer de navelstrenging de eerste 24 uur daarna zorgvuldig.

 Lees de	 Fabrikant	 Niet hergebruiken. Wegwerpproduct.
REF gebruikershandleiding Artikelnummer	 Te gebruiken voor	 Voldoet aan de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC (0402).
LOT Lotnummer	 Gebruik geen kapotte verpakking.	 Gesteriliseerd met ethyleenoxide.



REF: 9607 en 9607S

40-9607/9607S-210315

Kwaliteit ISO 9001 Milieu ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, 0371 330 30, info@wingplast.se, www.wingplast.se



Wing Plast AB